


OMB MEDITECH AG

Industrie Hofacker eMail: sales@omb-meditech.com
CH-9606 Bütschwil URL: www.omb-meditech.com
SWITZERLAND Tel.: +41-71-982-7201
Fax: +41-71-982-7202

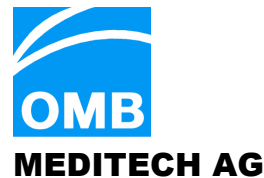

Zahnarztpraxis / Klinik

MWST-Nr. 553 733

15.09.2005 /bwe


Betreff: **Vapocid®-Tray System**
↳ **Indikator für Filterwechsel**

Sehr geehrte Damen und Herren

Anbei stellen wir Ihnen **zum Test** in Ihrer Praxis folgenden Matrize "Disc" (Scheibe) als DOWNLOAD (temporär) zur Verfügung:

↳ **Indikator für Filterwechsel**
(Indicator for Filter Change)

Drucken Sie die Matrize (1 Blatt = 15 Discs) auf Ihrem Laserdrucker und schneiden die DISCS zuerst aus. Danach plazieren Sie diesen Disc jeweils auf dem Tray-Deckel unter der Befestigungsmutter. (siehe Bild)

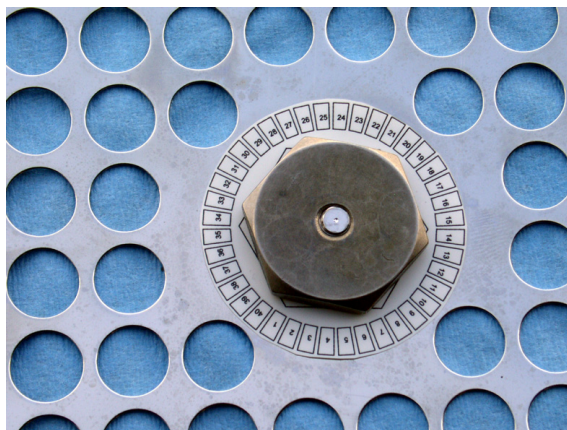

Vor dem Schliessen des Trays zur erneuten Sterilisierung im Autoklaven, streichen Sie jeweils am oberen und unteren Traydeckel ein Kästchen mit einem waschfesten Markierstift (PERMANENT MARKER) durch.

Wenn alle Kästchen durchgestrichen sind, ist in jedem Fall ein Filterwechsel notwendig. Es kann natürlich durch diverse Umstände vorkommen, daß ein Filterwechsel auch vorzeitig gemacht werden muß.

Abhängend von der Papierqualität kann es sein, dass Sie vorzeitig den DISC wechseln müssen, übertragen Sie in diesem Fall die folgende "Streichposition" des letzten Kästchens auf den neuen DISC. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

OMB MEDITECH AG

Bernhard Welters

Sales & Marketing Manager

Tel: +41-71-980-0206

GSM: +41-79-631-0865

URL: www.vapocid.com

eMail: sales@omb-meditech.com

Skype: **ombmeditech**

Software: <http://www.skype.com>

FAQ: Zum Thema: "Wie weis ich, wann ich den Filter wechseln muss?"