

# OMB MEDITECH AG

Industrie Hofacker eMail: sales@omb-meditech.com  
 CH-9606 Bütschwil URL: www.omb-meditech.com  
 SWITZERLAND Tel.: +41-71-982-7201  
 Fax: +41-71-982-7202



MWST-Nr. 553 733

## Vapocid®-Tray System




September 2003

Sehr geehrter Kunde  
 Sehr geehrte Kundin

## Informationsrundschriften · Information Bulletin

### Instrumentenhalter - Montage

<p><b>Vapocid®-Tray System</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Instrumentenhalter</li> <li>↳ (für Standard-Instrumente)</li> </ul> <p>Obwohl grösste Sorgfalt bei der Eingangskontrolle von Zulieferprodukten gewahrt wird, kann es sporadisch vorkommen, dass die Materialbeschaffenheit (Härte) manchmal von den vorgegebenen Werten abweichen kann, d.h. dass die Instrumentenhalter u. U. etwas härter sind. Bitte befolgen Sie in diesem Fall folgende Schritte:</p>	
<p>Instrumentenhalter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Vorbereitung</li> </ul>	<p>Legen Sie die Instrumentenhalter <u>vor</u> dem Anbringen am Vapocid®-Tray Behälter ca. 10 Minuten in <u>heisses</u> Wasser ( ca. 90°C ) um den Kunststoff weicher zu machen.</p>
<p>Instrumentenhalter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Sicherheitshinweis</li> </ul>	<p>Schützen Sie Ihre Hände durch Tragen von entsprechenden Handschuhen.</p>
<p>Instrumentenhalter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Montage</li> </ul>	<p>Danach können Sie die Instrumentenhalter <u>sehr leicht</u> anbringen.</p>

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben

mit freundlichen Grüssen  
**OMB MEDITECH AG**